

Sonde personnelle

Saint-Cloud
Plus

Sonde vaginale de stimulation et de biofeedback pour la rééducation périnéale

Vaginal probe for uro-gynecological
rehabilitation : stimulation and biofeedback.
Vaginale sonde zur urogynakologischen
rehabilitation : stimulation und biofeedback.
Sonda vaginal de reeducacion
uroginecologica : estimulacion y
biofeedback.
Vaginalelektrod for urogynekologisk
rehabilitering : stimulerong och
biofeedback.
Sonda vaginal di rieducazione
uroginetologica stimolazione e
biofeedback

Stimulation électrodes latérales

Courbure adaptée à l'anatomie

Collerette de repérage

Hygiène optimale

Référence : 114.610 / 6114610
Code ACL : 7579368 / 3401075793687
Conception Luc Guillaume,
Kinésithérapeute,
Design : Martine Chauveau.

CefarCompex 

SONDE "SAINT-CLOUD PLUS" A USAGE STRICTEMENT PERSONNEL

ENTRETIEN- NETTOYAGE

A nettoyer et/ou désinfecter (produits de désinfection à froid, Anioxyde 1000 de ANIOS par ex.) puis rincer **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET APRÈS CHAQUE UTILISATION**.
Ne pas utiliser une solution d'alcool ou de formol concentrée à plus de 20%.
Débrancher les câbles pour une immersion complète de la sonde.

APPAREIL PRÉCONISÉ

Doit être utilisée avec des appareils répondant à la directive 93/42 (CEE).
Aux caractéristiques suivantes :
- courant alternatif, biphasique, à moyenne nulle
- intensité max : 150 mA
- tension max : +/- 80 V

CONTRE- INDICATIONS

Grossesse, prolapsus total de l'utérus et du vagin, MST, dénervation totale, cancer de la sphère génito-urinaire, port de stimulateur cardiaque (demander l'avis du médecin).

MODE D'EMPLOI

- 1- Laver avant la première utilisation.
- 2- Introduire la sonde (déconnectée du stimulateur) dans le vagin jusqu'à ce que la collerette vienne en butée sur la vulve (réglage précis de la bonne profondeur de pénétration grâce à la collerette).
- 3- Bien positionner la sonde sur le fond vaginal (patiente couchée sur le dos, les parties métalliques de la sonde doivent être orientées vers le bas).
- 4- Relier les deux câbles connecteurs au câble de sortie de votre appareil de stimulation.
- 5- Mettre en marche le stimulateur, augmenter lentement l'intensité de stimulation.
- 6- A la fin de la séance, arrêter l'appareil et déconnecter la sonde.
- 7- Retirer la sonde du vagin et la nettoyer ou désinfecter.
- 8- La sonde doit être rangée dans son sachet d'origine qu'il faut conserver pendant tout le traitement (le numéro de série de fabrication figure sur le sachet).

ATTENTION

- Vérifier l'intégrité de la sonde avant chaque utilisation.
En cas de dommages, ne pas utiliser le produit.
- Effets secondaires rares : irritation et picotements.
- La patiente ne doit être connectée qu'à un seul stimulateur. Ne pas raccorder en même temps à un appareil chirurgical haute fréquence.
- Ne pas dépasser un traitement de plus de 30 minutes par jour.
- Réglage maximum 150 mA (tension de +/- 80 V de crête à 500 Hz) - Ne jamais introduire ou extraire la sonde lorsque le stimulateur est en marche - Pour des raisons d'hygiène et de sécurité : n'utiliser qu'avec les câbles fournis avec la sonde (ne pas utiliser avec une autre sonde).


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière en contact avec la patiente : ABS et inox 316 L biocompatible
Surface 1 électrode : 7,4 cm²
Long : 12,8 cm
Diam : +/- 2,4 cm
Livree avec 2 câbles souples.

La durée de vie de la sonde est limitée à une série de séances de rééducation.

CE 0473

COM-P-PACV3-006

 DJO France
Centre Européen de Fret
64990 Mouguerre
France